



Die sanfte Atem- therapie für die Nase

Das RC-Cornet® N (Nasencornet) verschafft effektiv und auf natürliche Weise eine freie Nase. Es wirkt langfristig abschwellend, schleimlösend und regenerierend.



RC
MEDIZINTECHNIK

Die Behandlung mit dem RC-Cornet[®] N (Nasencornet) verschafft auf natürliche Weise eine freie Nase und Nasennebenhöhlen.

Die Wirksamkeit dieses oszillierenden PEP-Systems, das mittels eines positiven Ausatmendrucks die Atemwege behandelt, ist wissenschaftlich belegt.


Der positive Druck, der beim Ausatmen in das Nasencornet entsteht, überträgt sich auf den gesamten Nasen-Rachenraum. Dadurch werden die Schleimhäute auf physikalischem Wege massiert und die oberen Atemwege belüftet – ganz ohne den Einsatz von Medikamenten.

Durch die sanfte Druckmassage der RC-Cornet[®] N Behandlung werden die oberen Atemwege von Schleim befreit, der Lymphfluss wird angeregt und die Öffnungen der Nasennebenhöhlen spürbar erweitert und belüftet.

Das RC-Cornet[®] N kann im Stehen, Sitzen oder Liegen angewendet werden und ist für Erwachsene und Kinder geeignet.

RC-Cornet[®] N Wirkungsbereich

Der Wirkungsbereich des RC-Cornet[®] N erstreckt sich über die gesamten Nasennebenhöhlen sowie den Rachenraum.

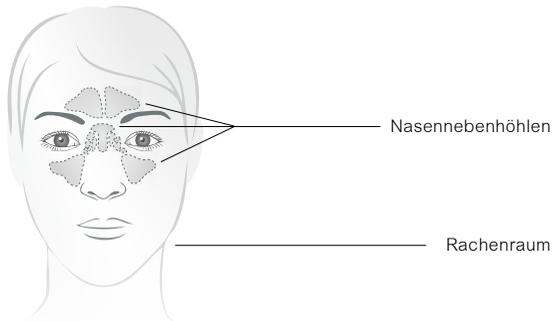


Vorteile der RC-Cornet[®] N Therapie

- befreit die oberen Atemwege von Schleim
- lindert den Husten beim Postnasal-Drip-Syndrom
- senkt Bronchiale Hyperreagibilität*
- hilft bei Nasenspraysucht (Privivismus)
- verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs
- optimiert die Medikamentendeposition

Bei regelmäßiger Anwendung werden die Beschwerden der Chronischen Sinusitis, des Postnasal-Drip-Syndroms, der Tubenventilationsstörungen (Belüftungsstörungen der Eustachi-Röhre), der Bronchialen Hyperreagibilität und der Nasenspraysucht (Privivismus) gelindert.

Dazu zählen u. a. eine verstopfte Nase, Druck im Ohr, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit, geschwollene Augen und ein eingeschränkter Geruchssinn. Schon bei der ersten Anwendung des RC-Cornet[®] N ist die Behandlung spürbar.

Die Wirkung der RC-Cornet[®] N Therapie zeigt sich deutlich anhand einer Thermomessung.

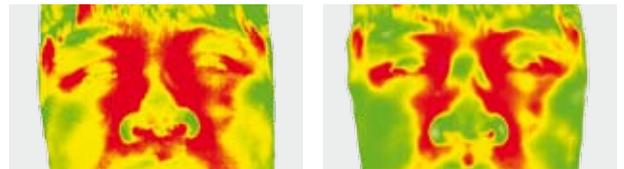

Ausgangsbefund einer chronischen Sinusitis mit deutlich angeschwollenen Schleimhäuten.

Nach Benutzung des RC-Cornet[®] N deutliches Abschwellen der Schleimhäute und damit Weitung der Nasennebenhöhlen. Die Nase ist freier.

*Quelle: Cegla U.H., Jost H.-J., Harten A., Veränderung von Postnasal-Drip, Reizhusten, Atemwegswiderstand und bronchialer Hyperreagibilität bei Asthma bronchiale durch oszillierende PEP-Behandlung (RC-Cornet[®] N) des Nasen-Rachen-Raums; Dustri Verlag München; Atemw.-Lungenkrkh., Jahrgang 29, Nr. 9/2003, S. 428–436


Effektiv, einfach und gut bei

- Chronischer Sinusitis
- Chronischer Schleimbildung im Nasen-Rachenraum
- Asthma mit Postnasal-Drip-Syndrom
- Belüftungsstörungen der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs
- Sinubronchiales Syndrom
- Nasenspraysucht (Privivismus)

NOCH EFFEKTIVER:

Kombi-Therapie

Die Kombination der RC-Cornet® N Therapie mit einer Inhalationstherapie mittels Vernebler (Feuchtinhalator) verbessert die Medikamentendeposition, reduziert die gesamte Therapiedauer und erhöht die Effektivität beider Behandlungen.

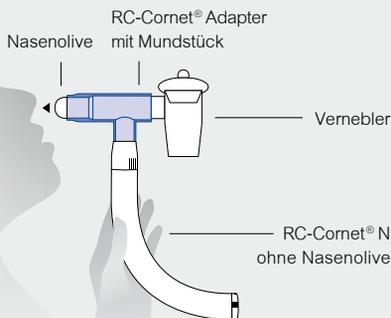

PZN 01 413 135

Der RC-Cornet® Adapter mit Mundstück verbindet das Nasencornet mit vielen gängigen Verneblern.

Ziehen Sie die Nasenolive aus dem Nasencornet. Setzen Sie diese in den RC-Cornet® Adapter mit Mundstück und anschließend den umgerüsteten Adapter auf das Nasencornet. Verbinden Sie nun Ihren Vernebler mit dem RC-Cornet® Adapter. Der Vernebler muss separat erworben werden.

RC-Pflege® N unterstützt die Behandlung mit dem RC-Cornet® N

Die Wirksamkeit der RC-Cornet® N Behandlung kann erhöht werden, wenn vor der Anwendung physiologische Kochsalzlösung in die Nase eingebracht wird.

Dazu bietet sich die RC-Pflege® N an. Das Nasen- und Rachenspray reinigt, schützt und pflegt die Schleimhäute. Es befeuchtet die Nasen- und Rachenschleimhaut und unterstützt die schnelle Regeneration sowie Wundheilung der Nasenschleimhaut. Ideal auch für Patienten mit Sauerstoff-Langzeit-Therapie geeignet.

Im Gegensatz zu den meisten Nasensprays mit abschwellender Wirkung ermöglicht die Zusammensetzung der RC-Pflege® N eine tägliche und dauerhafte Anwendung, ohne Gefahr, davon abhängig zu werden (Privivismus).

Das Logo besteht aus den Buchstaben 'RC' in blauer Schrift, gefolgt von 'PFLEGE' in weißer Schrift auf einem grauen Hintergrund, und einem roten 'N' in der oberen rechten Ecke.

Nasen- und Rachenspray

Schutz und Pflege
für Nase und Rachen



PZN 06 415 162

www.cegla-shop.de



Produktdetails

RC-Cornet® N

Artikel-Nr. 220 | PZN 08 862 327



Zubehör für die Kombi-Therapie

RC-Cornet® Adapter mit Mundstück

Artikel-Nr. 225 | PZN 01 413 135



Ergänzende Produkte

RC-Cornet® N Ersatzventilschläuche

2er Set

Artikel-Nr. 211 | PZN 08 756 217



RC-Clean

Reinigungsbeutel für die Mikrowelle

Einfache und schnelle Reinigung von
Medizinprodukten sowie Babyartikeln.
Nur für mikrowellengeeignete Produkte.

Artikel-Nr. 500 | PZN 10 751 032



Weitere Informationen:

www.nasencornet.de

Erhältlich in Apotheken,
Sanitätshäusern oder
unter www.cegla-shop.de

Herstellung und Vertrieb:

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Fon +49 2602 9213-0
info@cegla.de
www.cegla.de