


nachher vorher

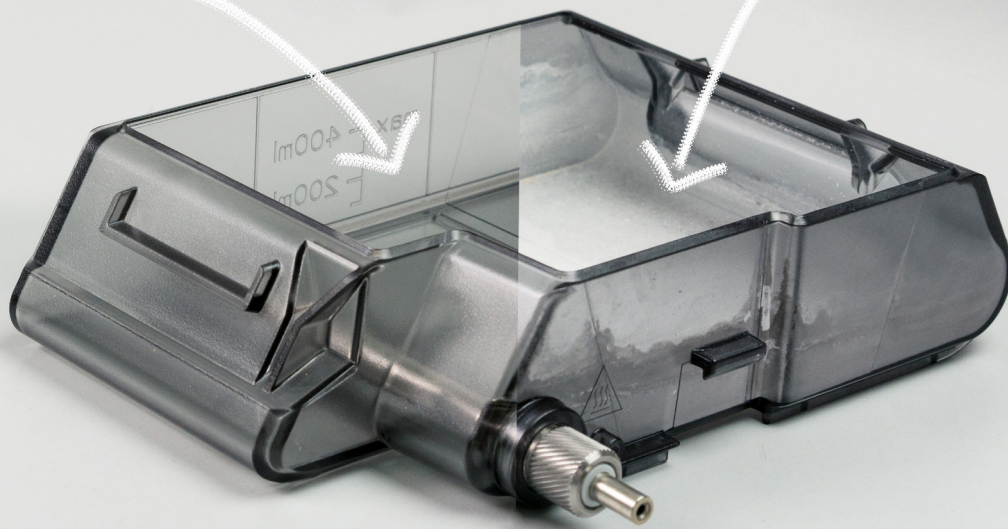

Spezial-Entkalker

Das Ultrakonzentrat zum Werterhalt Ihrer Befeuchterkammer



- Ideal für hochwertige PAP Geräte aller Marken
- Entfernt schonend und sicher Kalkrückstände
- Verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes

Die hochwirksame und sichere Anwendung garantiert eine mühelose und schnelle Entkalkung. Der regelmäßige Einsatz sorgt für eine optimale Sauberkeit der Befeuchterkammer. Der Spezial-Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Befeuchterkammer ist nach der Entkalkung und anschließendem Spülen wieder voll einsetzbar.

Einsatzgebiete:

CPAP- und APAP-Geräte, BiLevel-S und -ST-Geräte, ASV- und Titrationsgeräte inkl. Atemgasbefeuchter. Ideal auch für Heißwassergeäte.

Anwendung:

Konzentrat, je nach Verkalkung, 1:5 - 1:10 mit Wasser verdünnen.

Entkalkungsprozess gemäß Hersteller-Empfehlung. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

Hinweise:

Bitte unbedingt die Entkalkungsvorschriften der Geräte-Hersteller beachten. Nicht mit säureempfindlichen Oberflächen (z. B. Emaille, Alu, Marmor) in Kontakt bringen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Vor Frost schützen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
LS 4203-05	Spezial-Entkalker Konzentrat	500 ml



HOTREGA® GmbH · Lorenz-Weber-Str. 2 · D-36364 Bad Salzschlirf
 Telefon: (0 66 48) 95 29 - 0 · Fax: (0 66 48) 95 29 - 9 00
 E-Mail: info@hotrega.de · Internet: www.hotrega.de

Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
 Arzbacherstr. 80 · D-56130 Bad Ems
 Telefon: (0 26 03) 96 00 - 0
 Fax: (0 26 03) 96 00 - 50
 E-Mail: info@loewenstein.de
 Internet: www.hul.de

