

## Anleitung für IM-SC1109

### ResMed S9 Adapter für SoClean

Entfernen Sie den Original-Deckel von Ihrem Luftbefeuchter durch Öffnen des Deckels um ca. 3 cm, greifen Sie den Deckel in der Nähe des Scharniers und schieben Sie ihn vom Gerät weg.

Entfernen Sie die Silikondichtung vom Originaldeckel und installieren Sie diese auf dem neuen Deckel, achten sie darauf dass Dichtung flach anliegt und auf die beiden Laschen passt. Installieren Sie den neuen Deckel in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Schließen des neuen Deckels darauf achten, dass der Schlauch auf dem Boden des Befeuchterbehälters zu liegen kommt.

Verbinden Sie nun den Schlauch mit Rückschlagventil mit der Öffnung am neuen Deckel ihres Befeuchters.

