

VORTRAN

PercussiveNEB® 2.0

Model 8030

Vibrations Therapie



- ✓ Einfache und flexible Nutzung
- ✓ Kurze Einrichtungszeit
- ✓ Single-Patient-Use
- ✓ Der Patient initiiert und steuert selbst die Perkussionsebenen
- ✓ Kann von Patienten im Krankenhaus oder zu Hause verwendet werden
- ✓ Für Patienten mit Erkrankungen wie z.B. COPD, Mukoviszidose, Postoperative Atelektase

Intrapulmonaler perkussiver Hochfrequenz-Vernebler

AIRWAY CLEARANCE

Für Patienten mit eingeschränkter Atemfunktion und Probleme mit der Sekretreduktion

VORTRAN

PercussiveNEB® 2.0


Model 8030

Einstellungen & Technische Daten

Das PercussiveNEB® 2.0 ermöglicht drei Einstellungsstufen: Hard, Medium und Soft

	Peak Pressure	Frequency
Hard:	20 cm-H ₂ O	10 Hz
Medium:	14 cm-H ₂ O	15 Hz
Soft:	12 cm-H ₂ O	19 Hz

- Hard: Druckknopf nach unten gedrückt
im Uhrzeigersinn drehen
- Medium: Druckknopf nach unten gedrückt
eine ganze Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Soft: Druckknopf nach unten gedrückt
zwei ganze Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn

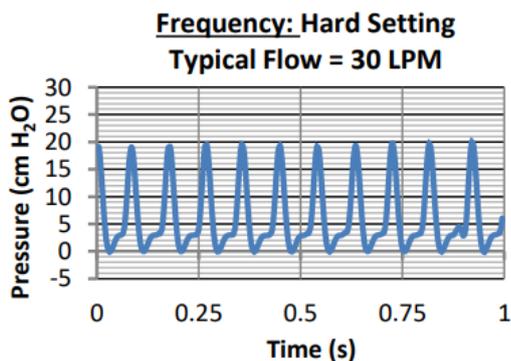

Flowrate:	30 l/min
Flowrate simulierte Inhalation:	25 l/min
Inhalationszeit:	2 Min
Aerosol Output:	0,38 ml/min
Partikelgröße MMAD:	6,00 µm

www.inspiration-medical.com

INSPIRATION Medical GmbH
Wohlfahrtstraße 115
D - 44799 Bochum
Tel.: 0234 970509-0
contact@inspiration-medical.com

INSPIRATION
Medical

Ihr Partner für innovative Medizintechnik